

Alma

die praktische Hilfe am Pflegebett
für die kleinen wichtigen Dinge.



Für die Dinge, die man gern in greifbarer Nähe wissen möchte.
Ein Trinkbecher, Telefon, Fernbedienung, Taschentuch, Brille
und Weiteres sind hier gut untergebracht und erreichbar.

einfach & gut



Vorteile auf den Punkt gebracht

Hilfreich

... demjenigen der auf Hilfe angewiesen ist und mit Alma kann dies ein Stückweit erreicht werden.

Praktisch

... weil Alma schnell und sicher am Pflegebett angebracht und sicher befestigt werden kann.

Optische Funktionalität

... die ansprechenden Farbtöne und die abgerundeten Formen dienen zur guten Erkennbarkeit und angenehmer Handhabung.

Sicherheit

... für den Pflegebedürftigen. Wenn er – gut erreichbar – jederzeit Hilfe rufen kann.

Unterstützung

... in besonderer Art und Weise. Alma ist eine helfende „Hand“ für alltäglich benötigte Gegenstände am Pflegebett.

Bereitstellung

... von Pflegematerial am Pflegebett. Hier können zum Beispiel benötigte Pflegemittel oder Medikamente für die tägliche Behandlung in greifbarer Nähe bereit stehen.



Einfach und gut

Ob innerseitig des Bettes oder von außen – die Anbringung können Sie individuell gestalten. Ob auf der Ausstiegsseite oder der gegenüberliegenden Seite – mit dem mitgelieferten Klettband ist die beschädigungsfreie Sicherung gegeben. Durch das Klettband ist eine variable Befestigung möglich – lose verschiebbar oder positioniert fixiert.



Lieferumfang Alma + Klettband

Farbvarianten: melone ●
 rubinrot ●
 perlweiß ●

Material: ASA / PA


Einfache Anbringung am Seitengitter des Pflegebettes.

1 Klettband anbringen

die längere Lasche an der Vorderseite von unten durch die Halteöffnung schieben und wie dargestellt befestigten, anschließend den Behälter auf den Holm stecken.

2 Länge anpassen

auf der Rückseite das Klettband von unten durch die Öse schieben und die Länge passend ziehen, anschließend mit der Lasche am Flauschband fixieren.

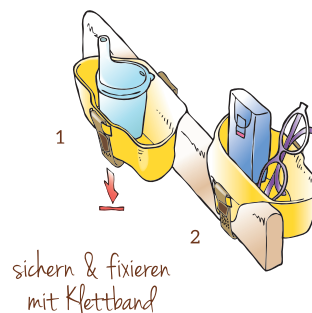

Hinweise

Die Anbringung am Pflegebett erfolgt an der Seitensicherung mit einer Holmstärke bis zu 3cm. Der Auslösemechanismus der Seitensicherung muss zugänglich bleiben, ohne durch den Behälter blockiert zu werden. Es ist notwendig die richtige Anbringung vor der Verwendung am Pflegebett zu überprüfen.



Pflegehinweise



Der Behälter und das Klettband sind beständig gegen gängige Desinfektions- und Reinigungsmittel und können maschinentechnisch gereinigt werden. Beschädigte Teile müssen ausgetauscht und ersetzt werden.



Kontakt

Privatpersonen können unsere Produkte über den örtlichen Sanitätsfachhandel und Online-Versandhandel beziehen.

Für Pflegeeinrichtungen arbeiten wir mit Vertriebspartner zusammen, sollte ihr Versorgungsunternehmen unsere Produkte noch nicht gelistet haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an uns.

dibucare - Pflege leichter gemacht
 59329 Wadersloh-Liesborn

Fon +49 2523 9939 - 19

Fax +49 2523 9939 - 25

 info@dibucare.de

 www.dibucare.de